
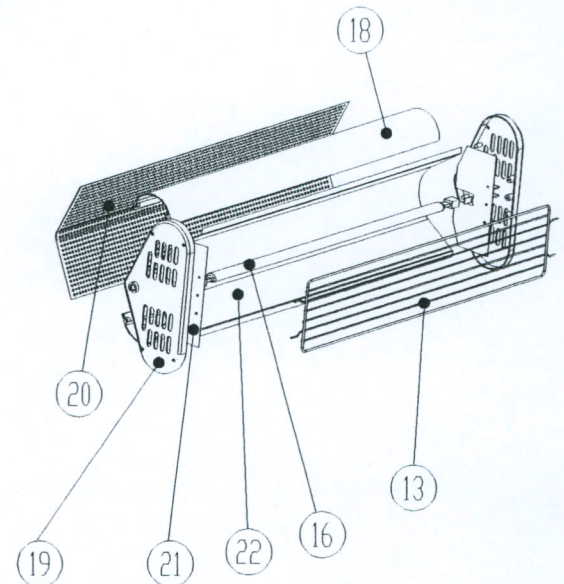



7. Ersatzteilliste

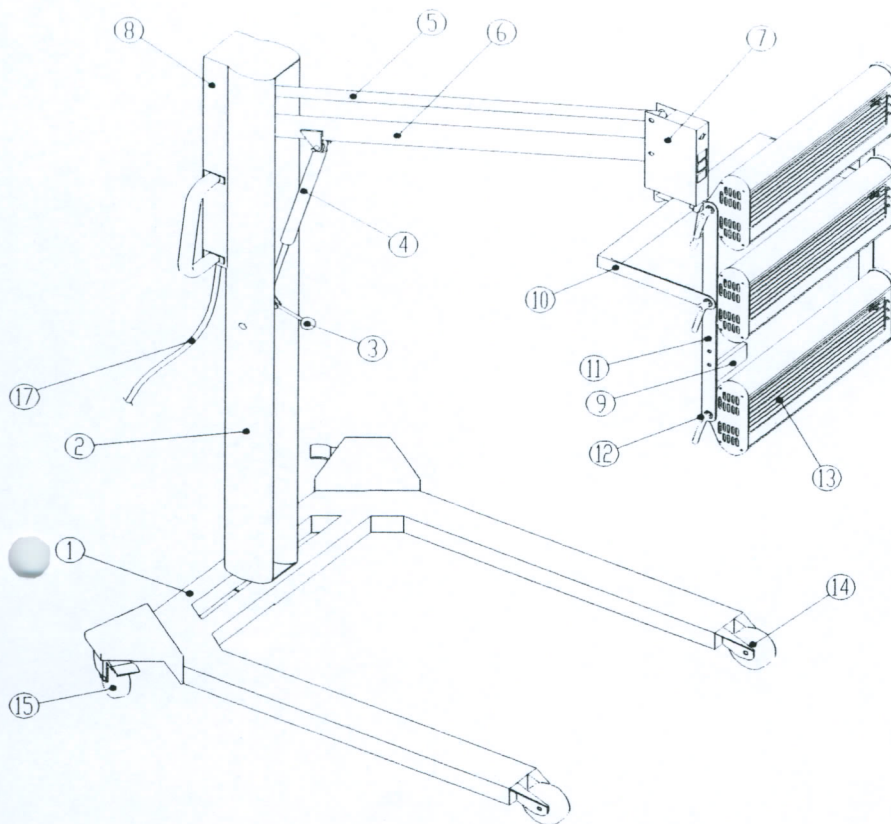


IR- B03-T					
Nr	Beschreibung	Art-Nr.:	Nr	Beschreibung	Art-Nr.:
1	Geräteständer	B03-1	12	Schraubverbindung/Knebel	B03-12
2	Stativ	B03-2	13	Schutzgitter	B03-13
3	Hebel mit Kugeknopf	B03-3	14	Rolle Vorderbau	B03-14
4	Pneumatikzylinder	B03-4	15	Lenkrolle mit Feststeller	B03-15
5	Arm (Teil 1)	B03-5	16	Leuchtröhre	B03-16
6	Arm (Teil 2)	B03-6	17	Stromkabel 3 x 2 mm	B03-17
7	Armbox	B03-7	18	Abdeckblech	B03-18
8	Schaltkasten	B03-8T	19	Seitenabdeckung Kassette	B03-19
9	Ultraschallbox	B03-9	20	Wärmeableitungsblech	B03-20
10	U-Kassettenhalterung	B03-10	21	kleines Reflektorblech	B03-21
11	Strahlerfeldverbindung	B03-11	22	großes Reflektorblech	B03-22

8. Anleitung Röhrentausch


1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts.
2. Entfernen Sie die Seitenwand der Kassette
3. Lösen Sie das Wärmeableitungsgehäuse im hinteren Bereich der Kassette
4. Lösen Sie die beiden Anschlusskabel der Röhre und ziehen Sie diese ab.
5. Entfernen Sie das Schutzgitter
6. Nehmen Sie die Röhre heraus, ersetzen Sie diese durch eine neue, und schließen Sie die Kabel wieder an.
7. Bringen Sie das Gitter, das Wärmeableitungsgehäuse und die Seitenwände der Kassette wieder an.
8. Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Lösungsmittel wie Brennspiritus, um den Reflektor, die Seitenwände und die Röhre zu reinigen.
(Siehe untenstehende Abbildungen)

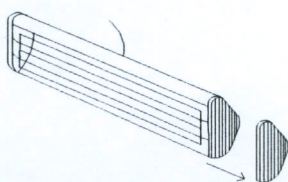


1

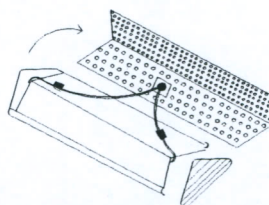


2

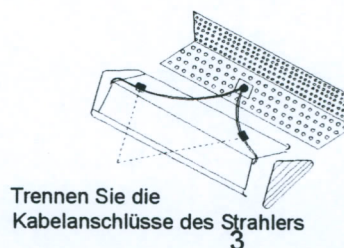


3

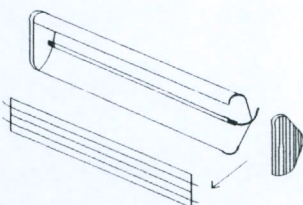

4

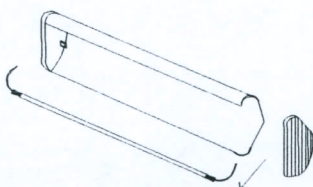

5

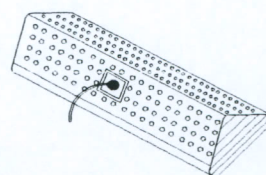

6